




QUICKCHANGE
INCONTINENCE WRAP

QuickChange™

لفافة السلس البولي للرجال

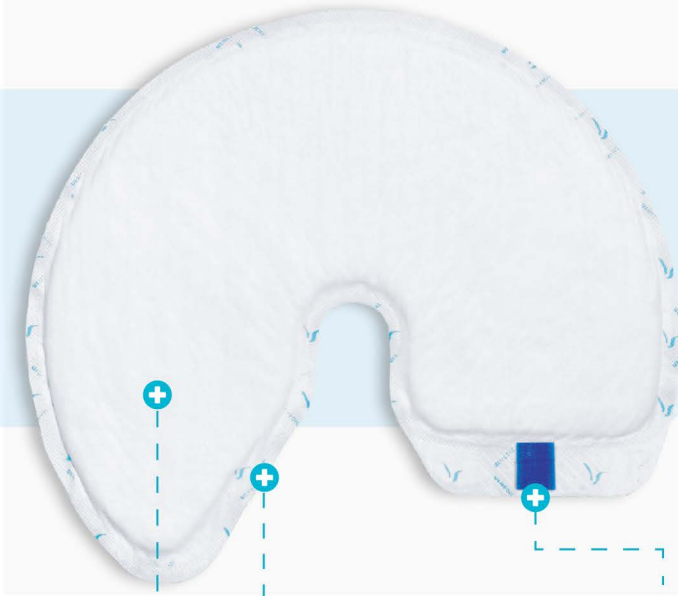

إغلاق بخلاف وحلقة

لا حاجة لشريط لاصق، مما
يسهل التركيب والإزالة

شكل فريد

مصممة لتناسب جميع الأشكال التشريحية،
ولا تتطلب تدوير المريض جانبياً للتركيب أو
الإزالة

جزء داخلي فائق الامتصاص

تسحب الرطوبة إلى الداخل وتمتص البول قبل
أن يلامس الجلد أو المفارش

الملف التعريفي للمريض

مناسب للذكور غير القادرين على الحركة
من مرضى السلس البولي.

أمثلة على حالات الاستخدام

- انكماش القضيب أو تضخم كيس الصفن
- المرضى الذين يعانون من تقرحات في الجلد
- المرضى الذين يستخدمون قسطرة بولية دائمة
- التهوية المكشوفة مع استخدام المفارش الماصة

الوقاية من العدوى

تستخدم مع القسطرة الدائمة للمساعدة في
تقليل خطر العدوى



بدل للقسطرة

تستخدم عند صعوبة استخدام القسطرة الخارجية



المحافظة على سلامة الجلد

تحافظ على الجلد جافاً دون الحاجة لاستخدام المواد اللاصقة






تعمل على تقليل التلامس بين الطاقم الطبي والمريض

تساعد على فحص المريض وتغييرها خلال ٦٠ ثانية فقط!



كيفية استخدام لفافة QuickChange

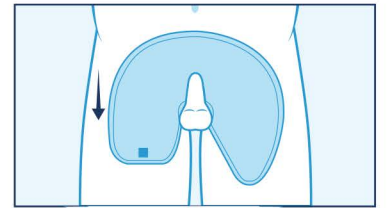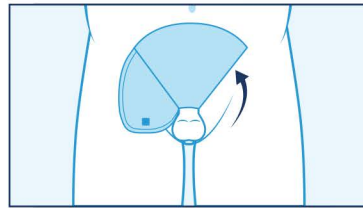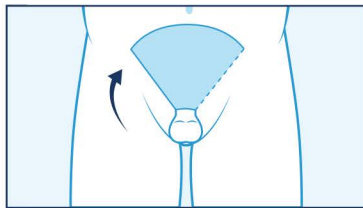

صور الكود لمزيد من
التطبيقات والتعليمات

٣. باستخدام إصبعين، اضغط على
المشبك الخفاف مع الجناح الداخلي
لضمان التثبيت

٢. اطو الجناح المثلث فوق القضيب
بزاوية ٤٥ درجة، ثم اطو الجناح
المستقيم فوقه


١. وجه الجانب الأبيض للأعلى والحافة
الدائرية باتجاه الرأس ووجه الجناحين
باتجاه الساقين

توجد تعليمات وطرق استخدام
إضافية على ظهر الصفحة


للمزيد من المعلومات
تواصل مع ممثل شركة Medline

استخدامات لفافة QuickChange


قضيب بالحجم القياسي (استخدم لفافة واحدة)

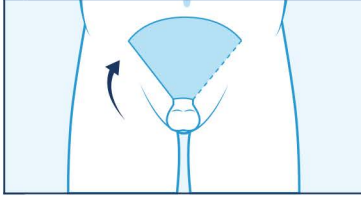

٣. باستخدام إصبعين، اضغط على المشبك الخفاف مع الجناح الداخلي لضمان التثبيت

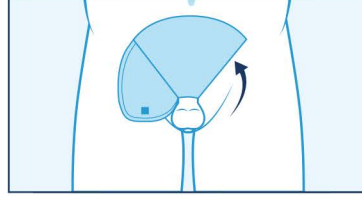


٢. اطو الجناح المثلث بزاوية ٤٥ درجة، ثم اطو الجناح المستقيم

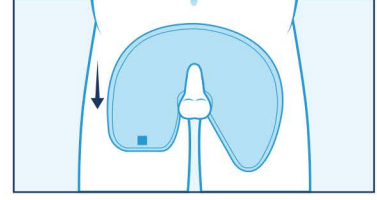


١. يوضع الجانب الأبيض لأعلى والحافة الدائرية باتجاه الرأس والجناحين لأسفل باتجاه الأرجل.


قضيب منكمش أو وذمة متوسطة في الصفن (استخدم لفافة واحدة)

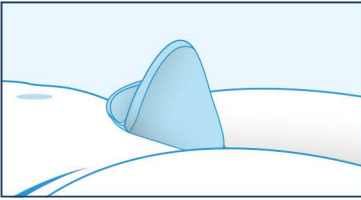

٣. اضغط على المشبك الخفاف مع الجناح الداخلي لضمان التثبيت

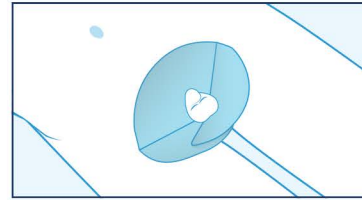


٢. مرر الجناح المثلث تحت كيس الصفن، ثم ارفعه لأعلى واطو الجناح المستقيم

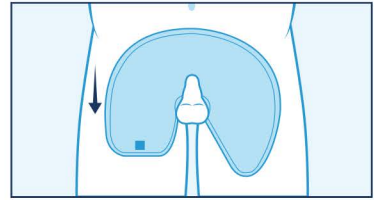


١. يوضع الجانب الأبيض لأعلى والحافة الدائرية باتجاه الرأس والجناحين لأسفل باتجاه الأرجل.

⚠️ الاستخدام الخاطئ

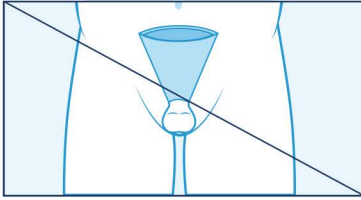


لا تلف اللفافة بشكل مخروط أو قمع ضيق.

وذمة كبيرة في الصفن (استخدم لفافتين)

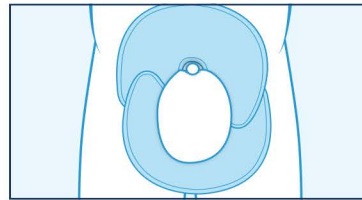


٢. اسحب الجناحين الآخرين باتجاه بعضهما لتكوين شكل وعاء تحت الصفن، ثم اضغط للتثبيت.

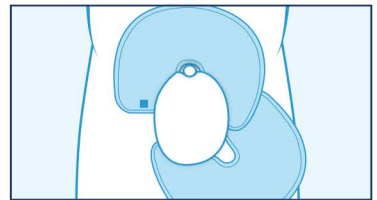


١. ضع لفافتان حول الصفن والقضيب، وثبت جناحا مستقيما وآخر مثلثا معا


مرضى السمنة (استخدم لفافتين)

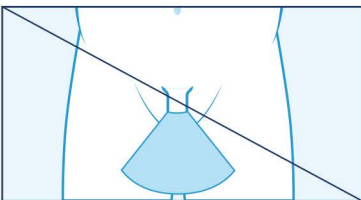

لا تترك طرف اللفافة موجها نحو الساقين

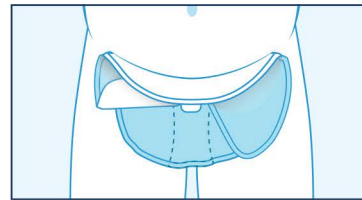

٢. ضع اللفافة الثانية واطوها من النصف طوليا إلى الأسفل، مع من تغطية المركز جيدا

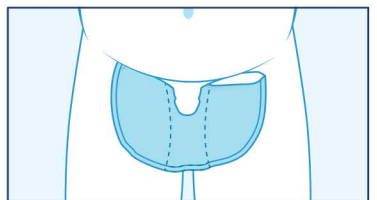

١. ضع اللفافة الأولى تحت الصفن، واسحبها باتجاه الرأس لضمان التماس، ثم ادفعها بين الساقين لالتقاط التسرب

