

1 QuickChange™ 男性用失禁ラップ



2 患者プロフィール

3 歩行能、失禁のある男性患者達

4 使用例

- 5 ・ 陰茎の陥没/陰囊の肥大
- 6 ・ 皮膚損傷のある患者たち
- 7 ・ 留置カテーテルを使用している患者たち
- 8 ・ アンダーパッドを使用した「オープンエアリング」



9 感染予防

10 感染のリスクを軽減するために留置カテーテルと併用してください。



11 カテーテルの代替

12 外部カテーテルの使用が困難な場合に使用できます。



13 肌の健康を維持

14 接着剤を使わずに尿が皮膚に付着するのを防ぎます。



15 スタッフと患者の接触を最小限に抑える

16 わずか60秒でチェックと交換が可能！



24 フックアンドループ留め具

25 接着剤が不要で、簡単に貼り付け、剥がせます


26 ユニークな形状

27 すべての解剖学タイプにフィットするように設計されており、装着や取り外しの際に体を回転させる必要がありません。


28 超吸収性コア

29 水分を吸い取り、肌やリネンに溜まる前に排出物を吸収します


17 クイックチェンジの適用方法

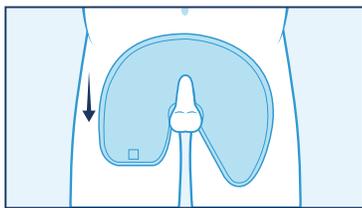

18 1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

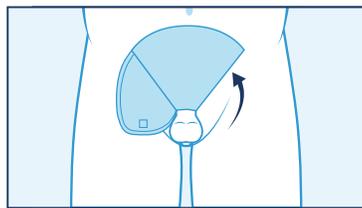

19 2. 尖ったフラップをペニスに45°の角度で折り曲げ、次にまっすぐなフラップを上へに折り曲げてください。

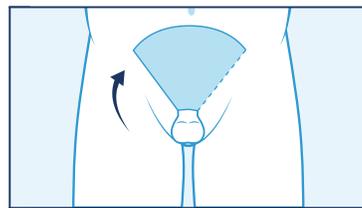


20 3. 二本の指でフックファスナーと内側のフラップをつまんで確実に固定してください。




追加のアプリケーションと情報については、QRコードをスキャンしてください。

30 QuickChange™ の使用方法


31 標準的なペニス (1つのラップを使用)

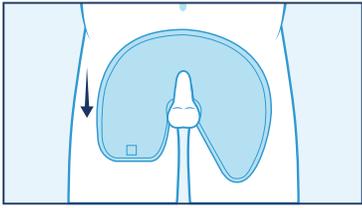

- 32 1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に向け、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

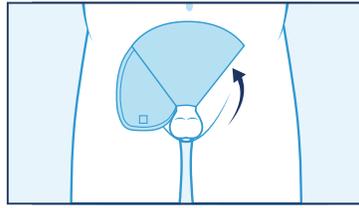


- 33 2. 尖ったフラップをペニスに45°の角度で折り曲げ、次にまっすぐなフラップを上にして折り曲げてください。

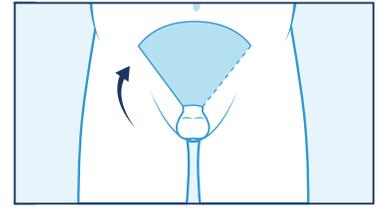


- 34 3. 二本の指でフックファスナーと内側のフラップをつまんで確実に固定してください。


陥没陰茎/中程度の陰嚢浮腫 (一つのラップ使用)

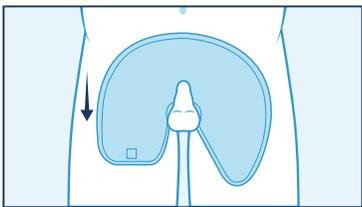

- 35 1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に向け、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

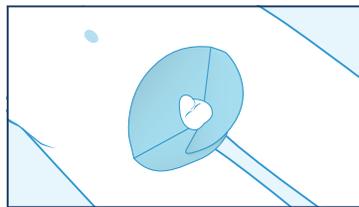


- 36 2. 尖ったフラップを陰嚢の下に差し込み、持ち上げて上方にすくい上げ、まっすぐなフラップを折り返してください。

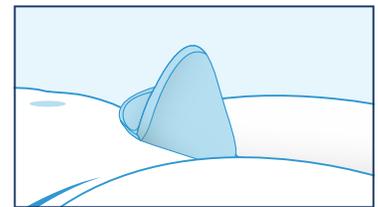


- 37 3. フック留め具と内側のフラップと一緒に挟み、しっかりと固定されていることを確認してください。

大きな陰嚢浮腫 (2つのラップを使用)

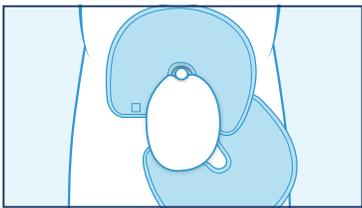


- 38 1. 陰嚢とペニスの周りに二つのラップを配置してください。まっすぐなフラップと尖ったフラップを一緒に固定してください。

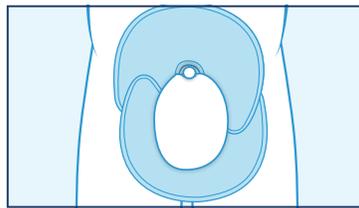


- 39 2. 残りの二つのフラップを互いに引き寄せ、陰嚢の下にボウル状を作り、一緒に挟んでしっかりと固定されていることを確認してください。

42 肥満患者用 (二つのラップを使用)

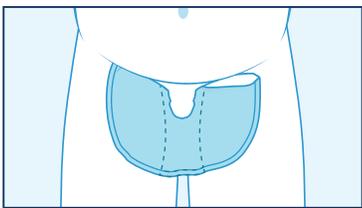


- 43 1. 陰嚢の下に配置し、接触を確実にするために頭側に引き寄せ、脚の間に挟んで排泄物をキャッチしてください。

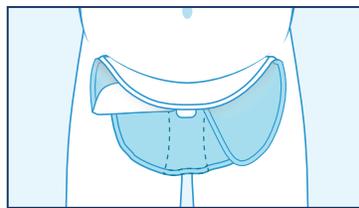


- 44 2. 二つ目のラップを置き、下向きと縦向きに半分に折り、中央が十分に覆われていることを確認してください。

40 ⚠️ 誤った使用方法

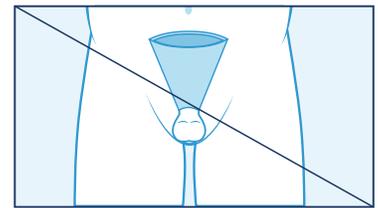

- 41 きつい円錐形や漏斗形に巻き込まないでください。

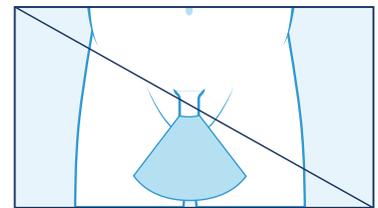

- 45 QuickChangeを脚の方向に向けたままにしないでください。