

Involucro per incontinenza maschile

QuickChange™



Profilo del paziente

Pazienti maschi non ambulanti e incontinenti

Esempi di casi d'uso

- Pene ritratto/scroto ingrossato
- Pazienti con deterioramento della pelle
- Pazienti con catetere permanente
- Ventilazione aperta con assorbenti protettivi



Prevenzione delle infezioni

Utilizzare in combinazione con un catetere permanente per aiutare a ridurre il rischio di infezione.



Alternativa al catetere

Utilizzare dove i cateteri esterni sono difficili da usare.




Mantenere l'integrità della pelle

Mantenere l'urina lontana dalla pelle senza usare adesivi.



Minimizzare il contatto tra il personale e il paziente

Controllo e cambio in 60 secondi!

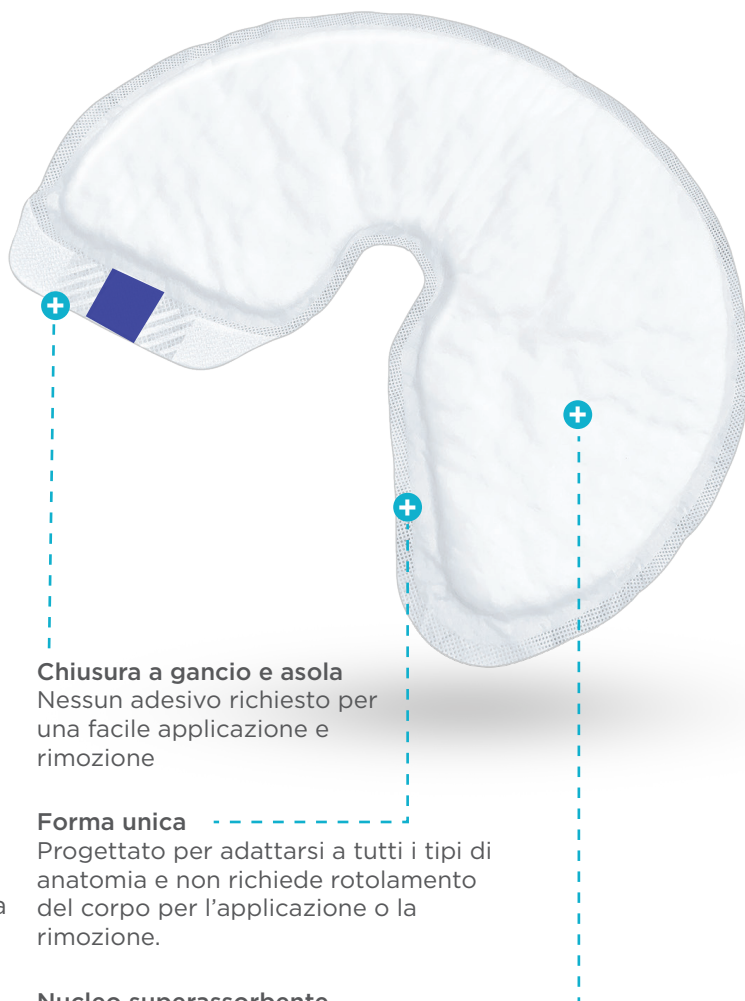

Chiusura a gancio e asola

Nessun adesivo richiesto per una facile applicazione e rimozione


Forma unica

Progettato per adattarsi a tutti i tipi di anatomia e non richiede rotolamento del corpo per l'applicazione o la rimozione.


Nucleo superassorbente

Assorbe l'umidità e il liquido prima che si accumulino sulla pelle o sulla biancheria


Come viene applicato QuickChange

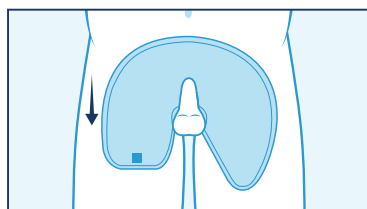

1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.

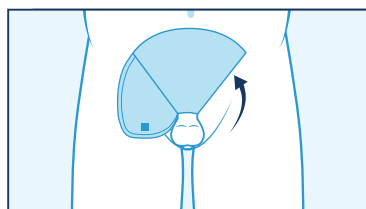

2. Piega la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piega la linguetta dritta sopra.

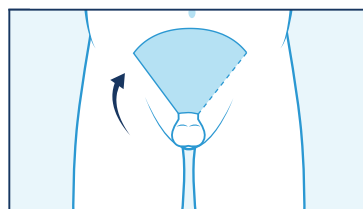

3. Con due dita, pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per assicurare il fissaggio.



Scansionare il codice QR per applicazioni aggiuntive e informazioni.


Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Quickchange.
customerservice@quickchange.com

Applicazioni aggiuntive e istruzioni sul retro di questa pagina.


Applicazioni QuickChange™




Pene standard (Utilizzare 1 involucro)

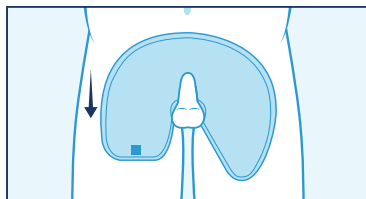

1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.

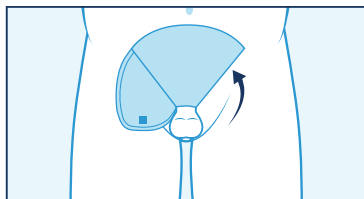


2. Piegare la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piegare la linguetta diritta sopra.

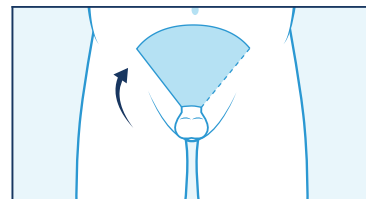


3. Con due dita, pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per garantire il fissaggio.


Pene retratto/Edema scrotale medio (Utilizzare 1 involucro)

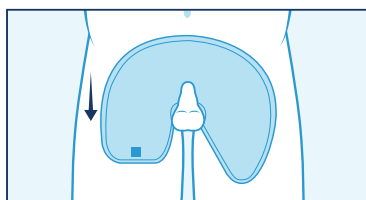

1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.

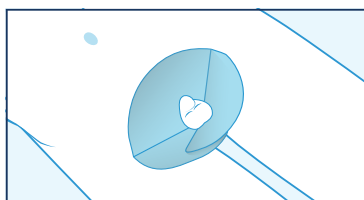


2. Far scivolare la linguetta appuntita sotto lo scroto, sollevare verso l'alto e poi piegare la linguetta diritta sopra.

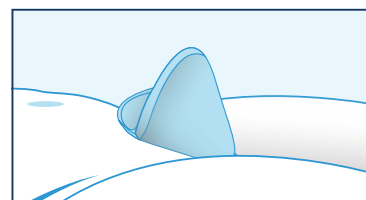


3. Pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per garantire il fissaggio.

Edema scrotale grande (Utilizzare 2 involucri)

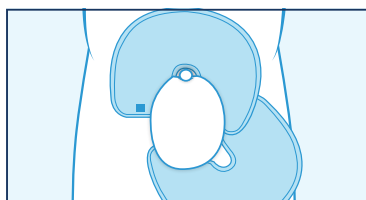


1. Posizionare due involucri intorno allo scroto e al pene; fissare insieme una linguetta diritta e una appuntita.

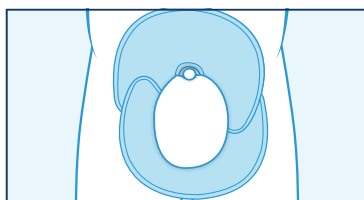


2. Tirare gli altri due lembi verso l'interno, creando una forma a ciotola sotto lo scroto e pizzicare insieme per garantire il fissaggio.

⚠️ Uso scorretto

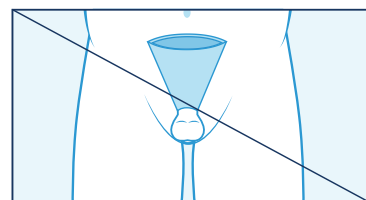


Non arrotolare in una forma a cono/imbuto stretta.


Bariatrico (Utilizzare 2 involucri)

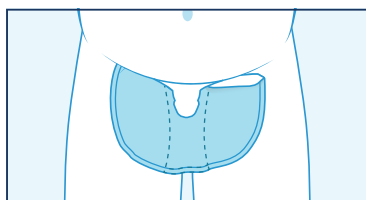

1. Posizionare sotto lo scroto, tirare verso la testa per garantire il contatto, infilare tra le gambe per raccogliere il liquido.

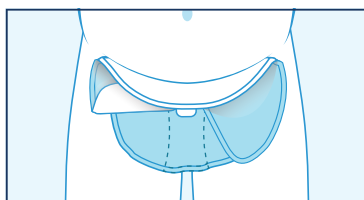

2. Posizionare il secondo involucro e piegarlo a metà verso il basso e in larghezza, assicurandosi che il centro sia adeguatamente coperto.

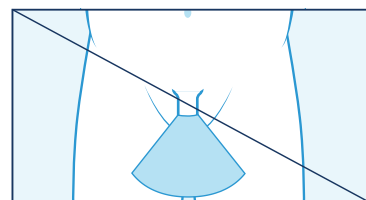

Non lasciare il QuickChange puntato verso le gambe.