

QuickChange™ moški zavoj za inkontinenco



Profil bolnika

Nepokretni, inkontinentni moški bolniki

Primeri uporabe

- Skrit penis/povečan skrotum
- Bolniki s kožnimi razjedami
- Bolniki s trajnim katetrom
- "Prezračevanje" s podlogami



Preprečevanje okužb

Uporaba skupaj s trajnim katetrom lahko pomaga zmanjšati tveganje za okužbo.



Alternativa katetru

Uporabno, kadar je zunanje katetre težko uporabiti.




Ohranite celovitost kože

Preprečite stik urina s kožo brez uporabe lepil.



Zmanjšanje stika med osebjem in pacientom

Preverjanje in menjava v 60 sekundah!

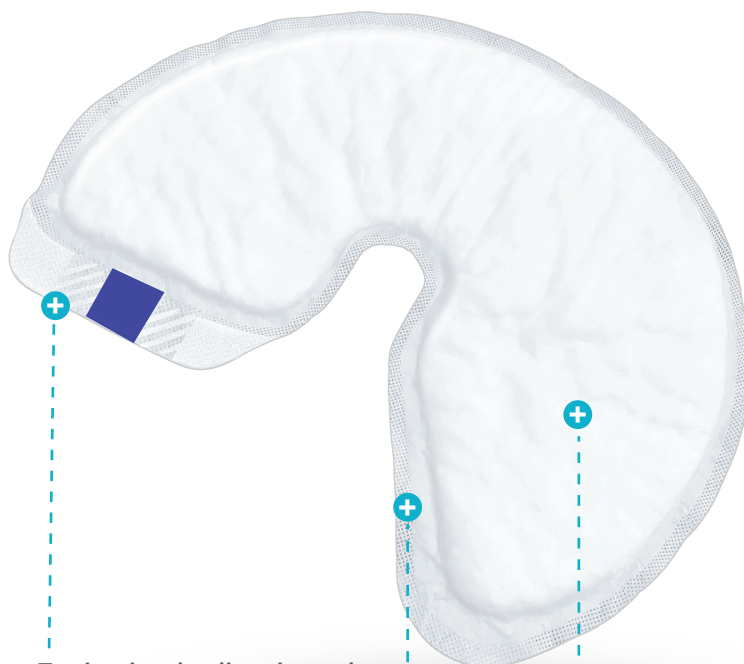

Zapiranje s kavljem in zanko

Brez potrebe po lepilu za enostavno namestitvev in odstranitev


Edinstvena oblika

Zasnovan za prileganje vsem anatomskim tipom, in ne zahteva obračanja pacienta pri namestitvi in odstranitvi


Supervpojno jedro

Odvaja vlago in absorbira izločke, preden pridejo v stik s kožo ali posteljnino


Uporaba QuickChange

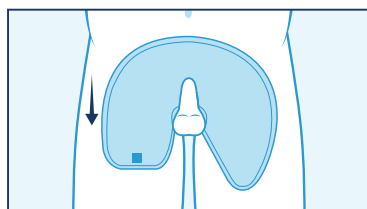

1. Postavite belo stran navzgor, okrogli rob proti glavi in dva zavihka navzdol proti nogam.

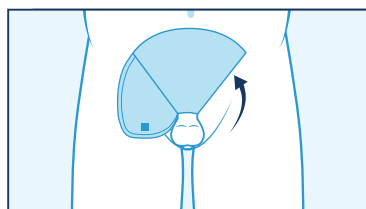

2. Prepognite koničasti zavih preko penisa pod kotom 45° in nato preklopite ravni zavih.

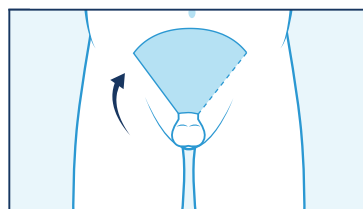

3. Z dvema prstoma stisnite zapenjalo in notranji zavih, da zagotovite pritrditev.



Skenirajte QR kodo za dodatne načine uporabe in informacije


Za dodatne informacije se obrnite na svojega predstavnika Quickchange.
customerservice@quickchange.com

Dodatni načini uporabe in navodila so na zadnji strani te strani.


Uporaba QuickChange™




Standardni penis (uporabite 1 zavoј)

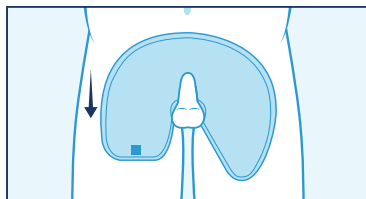

1. Postavite belo stran navzgor, okrogli rob proti glavi in dva zavihka navzdol proti nogam.

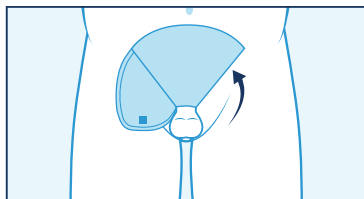


2. Prepognite koničasti zavih preko penisa pod kotom 45° in nato preklopite ravni zavih.

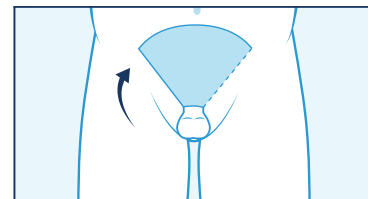


3. Z dvema prstoma stisnite zapenjalno in notranji zavih, da zagotovite pritrditev.


Skrit penis/Srednji skrotalni edem (uporabite 1 zavoј)

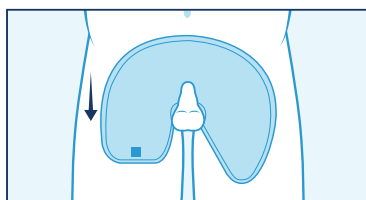

1. Postavite belo stran navzgor, okrogli rob proti glavi in dva zavihka navzdol proti nogam.

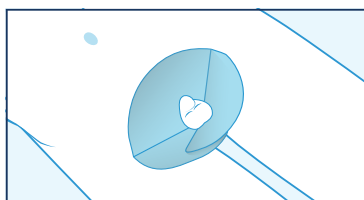


2. Potisnite koničasti rob pod skrotum, dvignite in potegnite navzgor, nato pa prepognite ravni zavihek čez.

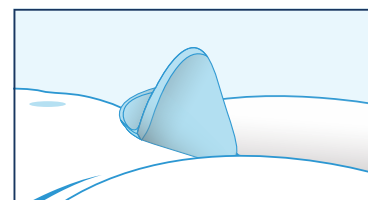


3. Stisnite zaponko s kljuko in notranji zavihek skupaj, da zagotovite pritrditev.

Velik skrotalni edem (uporabite 2 zavoја)

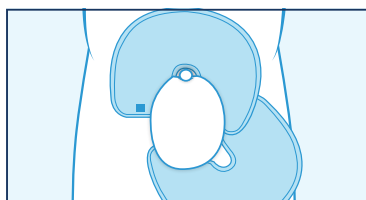


1. Postavite dva zavoја okoli skrotuma in penisa; pritrdite ravni in koničasti zavihek skupaj.

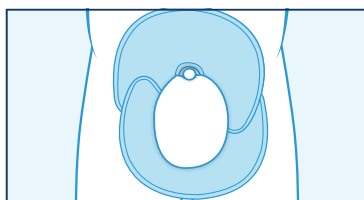


2. Povlecite preostala dva zavihka proti drug drugemu, da ustvarite obliko skleda pod skrotumom, in jih stisnite skupaj, da zagotovite pritrditev.

Bariatrični bolniki (uporabite 2 zavoја)

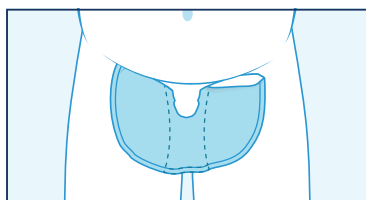


1. Postavite pod skrotum, povlecite proti glavi, da zagotovite stik, in vstavite med noge, da ujame iztek.

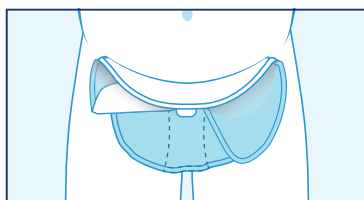


2. Postavite drugi zavoј in ga prepognite na polovico navzdol in vzdolžno, poskrbite, da bo sredina ustrezno pokrita.

⚠ Napačna uporaba

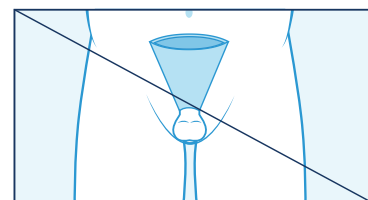

Ne zvijajte v tesno stožčasto/lijakasto obliko.

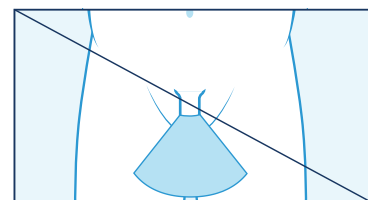

Ne pustite, da je QuickChange usmerjen proti nogam.