

QuickChange™

Inkontinensskydd för män



Patientprofil

Rörelsehindrade, inkontinenta manliga patienter

Exempel på användningsområden

- Retraktil penis/förstorad pung
- Patienter med hudskador
- Patienter med en kvarliggande kateter
- Öppen luftning med skyddsdynor



Infektionsförebyggande

Används tillsammans med en kvarliggande kateter för att hjälpa till att minska risken för infektion.



Kateteralternativ

Används när externa katetrar inte är ett lämpligt alternativ.




Bevara hudens skyddsbarriär

Skydda huden från urin utan att använda vidhäftande ämnen.



Minimera kontakten mellan personal och patient

60-sekunders kontroll och byte!

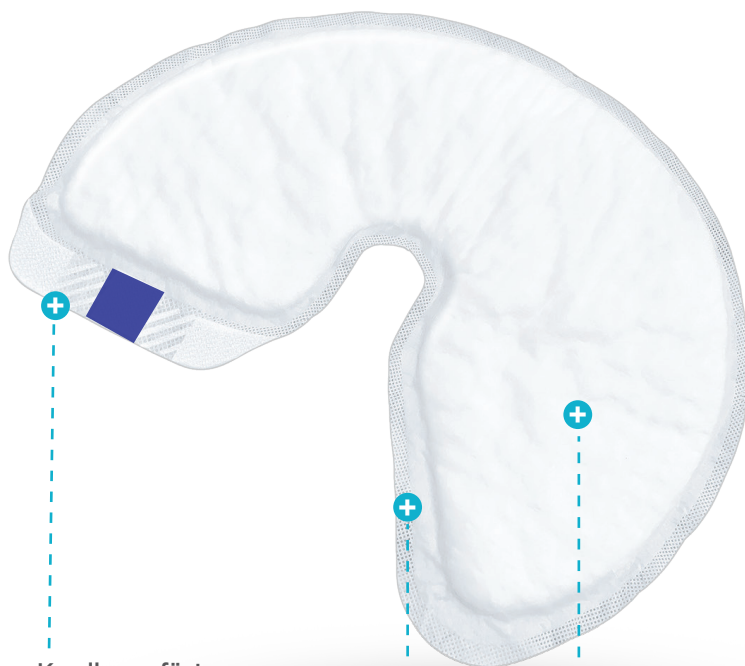

Kardborrefäste

Enkel applicering och borttagning utan vidhäftande ämnen


Unik form

Designad för att passa alla kroppstyper och kräver ingen rullning för applicering eller borttagning


Superabsorberande kärna

Suger upp fukt och absorberar vätska innan den når huden eller sängkläder


Så applicerar man QuickChange

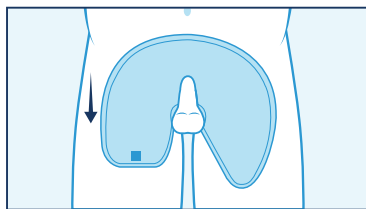

1. Placera den vita sidan upp, rundad kant mot huvudet och de två flikarna ner mot benen.

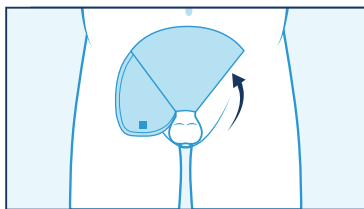

2. Vik den spetsiga fliken över penis vid 45° och vik sedan den raka fliken över.

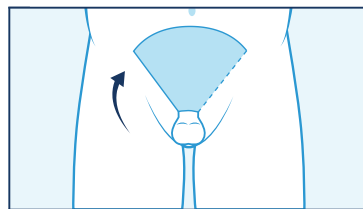

3. Med två fingrar, nyp ihop krokspänne och inre flik för att fästa ihop dem.



Skanna QR-koden för ytterligare tillämpning och information.


Kontakta din Quickchange-representant för mer information.
customerservice@quickchange.com

Ytterligare tillämpning och instruktioner på baksidan av detta informationsblad.


Applicering av QuickChange™




Standardpenis (Använd 1 skydd)

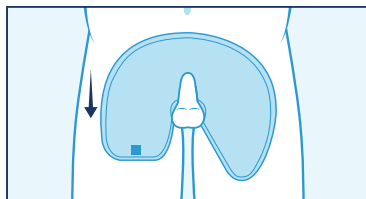

1. Placera den vita sidan upp, rundad kant mot huvudet och de två flikarna ner mot benen.

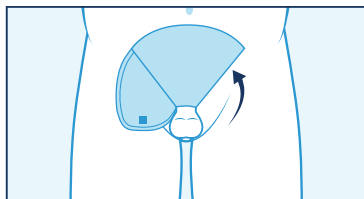


2. Vik den spetsiga fliken över penis vid 45° och vik sedan den raka fliken över.

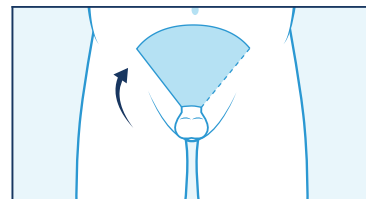


3. Med två fingrar, nyp ihop krokspänne och inre flik för att fästa ihop dem.


Retraktil penis/Medelsvårt testikelödem (Använd 1 skydd)

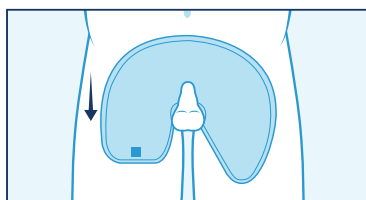

1. Placera den vita sidan upp, rundad kant mot huvudet och de två flikarna ner mot benen.

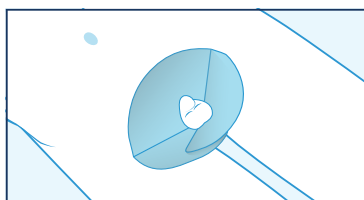


2. Skjut den spetsiga fliken under pungen, lyft och skopa uppåt och vik sedan den raka fliken över.

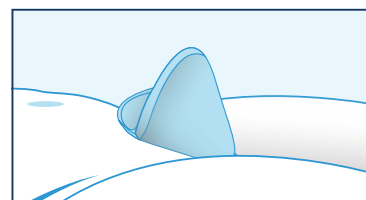


3. Nyp ihop krokspänne och inre flik för att fästa ihop dem.

Stort testikelödem (Använd 2 skydd)

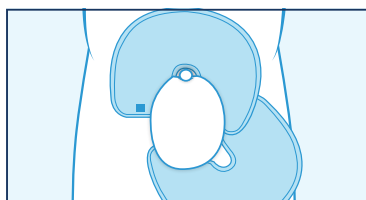


1. Placera två skydd runt pungen och penis. Sätt ihop en rak och en spetsig flik.

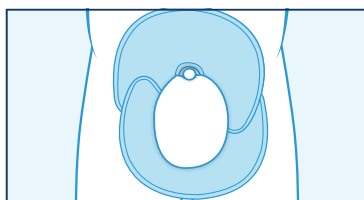


2. Dra de andra två flikarna mot varandra, skapa en skålförm under pungen och nyp ihop för att fästa dem.

Bariatrisk (Använd 2 skydd)

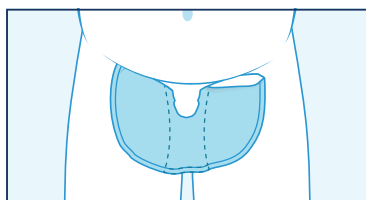


1. Placera under pungen, dra i riktning mot huvudet för att säkerställa kontakt, stoppa mellan benen för att fånga upp avrinning.

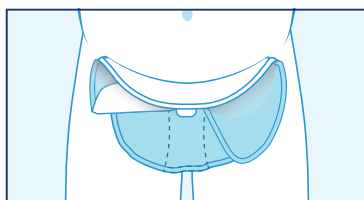


2. Placera in det andra skyddet och vik den på hälften nedåt och längs med, se till att mitten är ordentligt täckt.

⚠ Felaktig användning

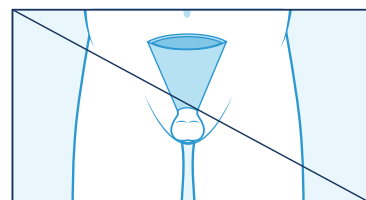

Rulla inte till en tajt kon-/trattform.

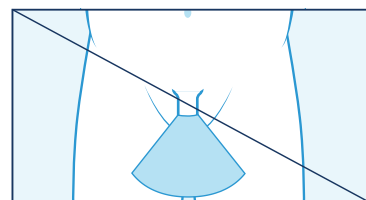

Lämna inte QuickChange pekande mot benen