

QuickChange™

Incontinentiewrap voor mannen



Patiëntenprofiel

Niet-ambulante, incontinentie mannelijke patiënten

Voorbeelden van gebruikssituaties

- Penisretractie/vergroot scrotum
- Patiënten met huidaafbraak
- Patiënten met een verblijfskatheter
- “Blootstelling aan lucht” met onderleggers



Infectiepreventie

Gebruik in combinatie met een verblijfskatheter om het risico op infectie te verkleinen



Alternatief voor katheter

Gebruiken wanneer externe katheters niet geschikt zijn




Behoud van huidintegriteit

Voorkomt dat urine de huid raakt zonder gebruik van kleefmiddelen



Minimaliseer het contact tussen personeel en patiënt

Controleer en vervang in 60 seconden!

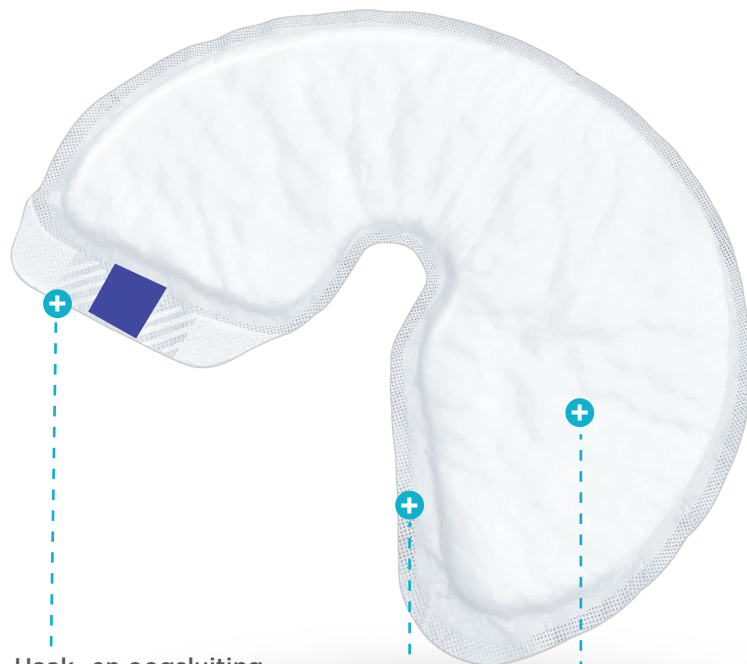

Haak- en oogsluiting

Eenvoudig aanbrengen en verwijderen zonder kleefmiddel


Unieke vorm

Ontworpen voor alle anatomische types, waarbij de patiënt niet gedraaid hoeft te worden tijdens het aanbrengen of verwijderen


Superabsorberende kern

Voert vocht af en absorbeert de urine voordat deze zich kan ophopen op de huid of het linnengoed


Hoe QuickChange gebruiken?

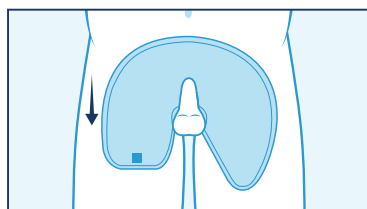

1. Plaats de witte zijde naar boven, met de ronde rand boven de eikel en de flapjes naar de benen gericht.

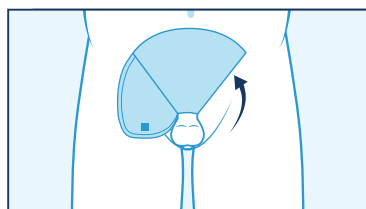

2. Vouw de puntige flap over de penis in een hoek van 45° en vouw vervolgens de rechte flap erover.

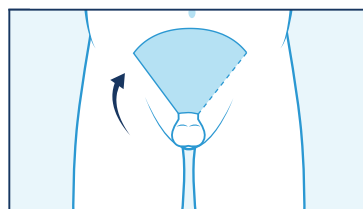

3. Druk met twee vingers de haaksluiting en binnenste flap goed op elkaar voor een zorgvuldige sluiting.



Scan de QR-code voor aanvullende informatie en toepassingen


Neem voor meer informatie contact op met uw Quickchange-vertegenwoordiger.
customerservice@quickchange.com

Voor aanvullende toepassingen en instructies: zie achterzijde pagina.


QuickChange™ Toepassingen




Standaard Penis (Gebruik 1 Wrap)

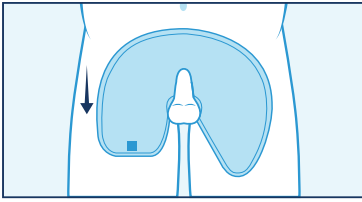

1. Plaats de witte zijde naar boven, met de ronde rand boven de eikel en de flapjes naar de benen gericht.

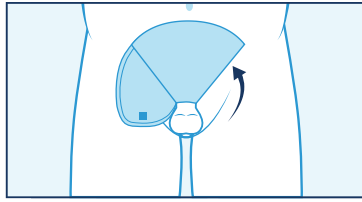


2. Vouw de puntige flap over de penis in een hoek van 45° en vouw vervolgens de rechte flap erover.

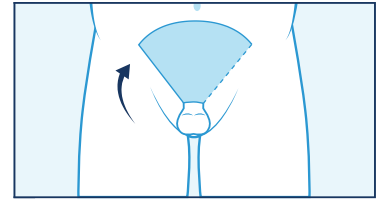


3. Druk met twee vingers de haakjessluiting en binnenste flap goed op elkaar voor een zorgvuldige sluiting.


Penisretractie/Matig Scrotaal Oedeem (Gebruik 1 Wrap)

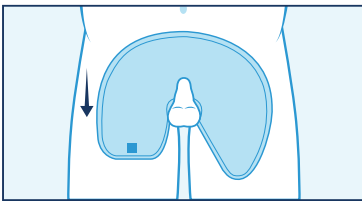

1. Plaats de witte zijde naar boven, met de ronde rand boven de eikel en de flapjes naar de benen gericht.

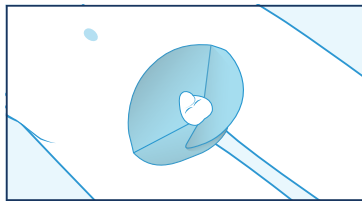


2. Schuif de puntige flap onder het scrotum, til samen op en vouw de rechte flap eroverheen.

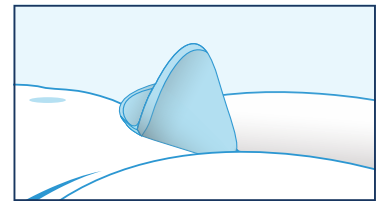


3. Druk de haakjessluiting en binnenste flap samen voor een zorgvuldige sluiting.

Groot Scrotaal Oedeem (Gebruik 2 Wraps)

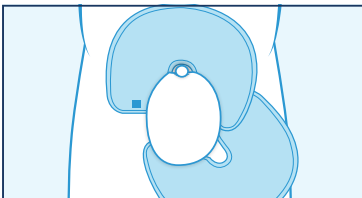


1. Plaats twee wraps rond het scrotum en de penis; bevestig een rechte aan een puntige flap.

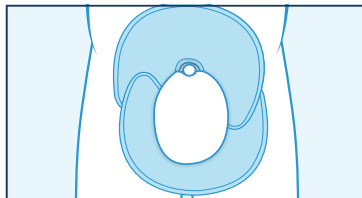


2. Trek de andere twee flappen naar elkaar toe om een komvorm onder het scrotum te vormen en druk ze stevig samen voor een zorgvuldige sluiting.

⚠ Onjuist gebruik

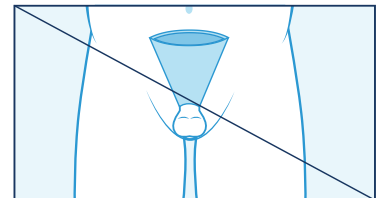


Rol niet op tot een strakke kegel- of trechtervorm.


Zwaarlijvigheid (Gebruik 2 Wraps)

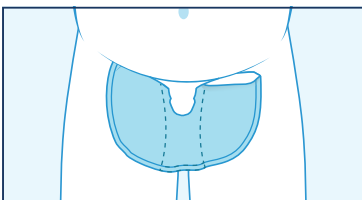

1. Plaats onder het scrotum, trek naar de eikel toe voor optimaal contact en stop het tussen de benen om lekkage op te vangen.

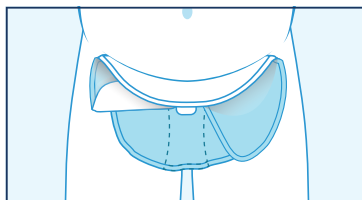

2. Vouw de tweede wrap in de lengte doormidden en naar beneden, zodat het middendeel volledig bedekt wordt.

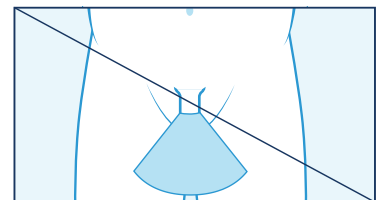

Zorg dat de QuickChange niet in de richting van de benen wijst.