

# QuickChange™ Inkontinenz-Windel für Männer



## Patientenprofil

Nicht gehfähige, inkontinente männliche Patienten

## Beispiele für Anwendungsfälle

- Zurückgezogener Penis/vergrößerter Hodensack
- Patienten mit Hautschäden
- Patienten mit Dauerkatheter
- „Offene Belüftung“ mit Unterlagen



### Infektionsprävention

Verwenden Sie die Windel in Kombination mit einem Dauerkatheter, um das Infektionsrisiko zu verringern.



### Katheteralternative

Verwenden Sie die Windel, wenn externe Katheter problematisch sind.




### Bewahrung der Hautintegrität

Die Windel hält den Urin ohne Anwendung von Klebepflastern von der Haut fern.



### Minimierung des Kontaktes zwischen Personal und Patient

Überprüfen und wechseln Sie die Windel in nur 60 Sekunden!

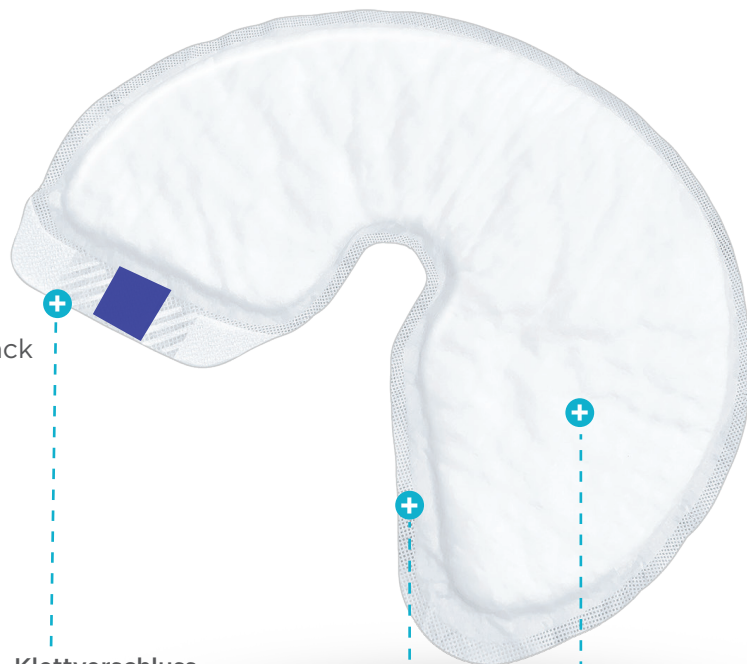

### Klettverschluss

Es sind keine Klebepflaster für ein einfaches Anlegen und Entfernen erforderlich.


### Einzigartige Form

Die Windel ist für alle Körpertypen geeignet und kann ohne Umlagern des Patienten angelegt und entfernt werden.


### Hochabsorbierender Kern

Leitet die Feuchtigkeit nach innen und absorbiert Ausscheidungen, bevor sie sich auf der Haut oder Unterwäsche ansammeln.


## So wird QuickChange angelegt

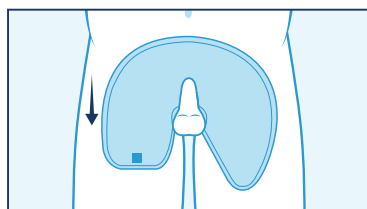

1. Legen Sie die weiße Seite nach oben, die runde Kante in Richtung des Kopfes und die beiden Lappen nach unten in Richtung der Beine.

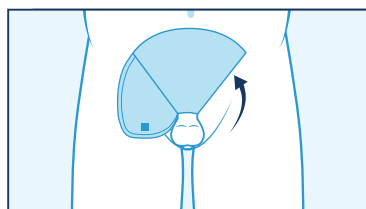

2. Falten Sie den spitzen Lappen in einem Winkel von 45° über den Penis, und falten Sie anschließend den geraden Lappen darüber.

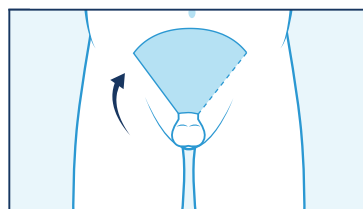

3. Drücken Sie das Hakenband und den inneren Lappen mit zwei Fingern zusammen, um eine optimale Befestigung sicherzustellen.




Scannen Sie den QR-Code für weitere Anwendungen und Informationen.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Quickchange-Vertreter.  
[customerservice@quickchange.com](mailto:customerservice@quickchange.com)

Weitere Anwendungen und Anweisungen finden Sie auf der Rückseite dieser Seite.


## Normaler Penis (Verwenden Sie 1 Windel)

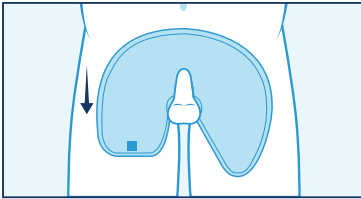

1. Legen Sie die weiße Seite nach oben, die runde Kante in Richtung des Kopfes und die beiden Lappen nach unten in Richtung der Beine.

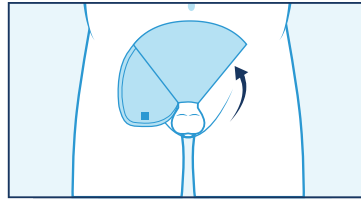


2. Falten Sie den spitzen Lappen in einem Winkel von 45° über den Penis, und falten Sie anschließend den geraden Lappen darüber.

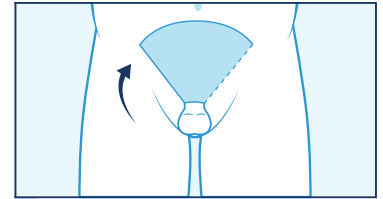


3. Drücken Sie das Hakenband und den inneren Lappen mit zwei Fingern zusammen, um eine optimale Befestigung sicherzustellen.


## Zurückgezogener Penis/Mittleres Hodensacködem (Verwenden Sie 1 Windel)

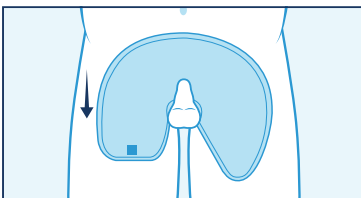

1. Legen Sie die weiße Seite nach oben, die runde Kante in Richtung des Kopfes und die beiden Lappen nach unten in Richtung der Beine.

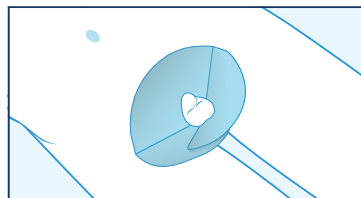


2. Schieben Sie den spitzen Lappen unter den Hodensack, heben Sie ihn an und schieben Sie ihn nach oben, und falten Sie anschließend den geraden Lappen darüber.

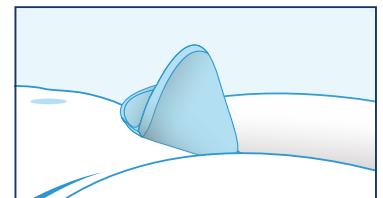


3. Drücken Sie das Hakenband und den inneren Lappen zusammen, um eine optimale Befestigung sicherzustellen.

## Großes Hodensacködem (Verwenden Sie 2 Windeln)

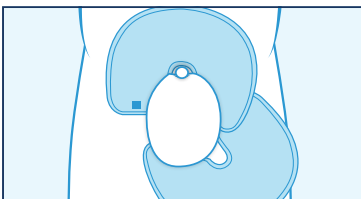


1. Legen Sie zwei Windeln um den Hodensack und Penis; befestigen Sie einen geraden Lappen an einem spitzen Lappen.

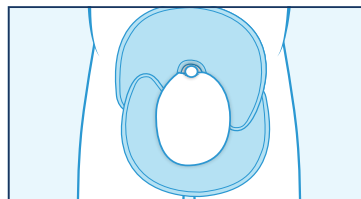


2. Ziehen Sie die anderen beiden Lappen gegeneinander, sodass eine Schalenform unter dem Hodensack entsteht, und drücken Sie sie zusammen, um eine optimale Befestigung sicherzustellen.

## ⚠ Falsche Anwendung

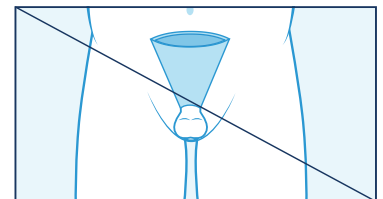


Rollen Sie die Windel nicht zu einem engen Kegel/Trichter zusammen.


## Bariatrie (Verwenden Sie 2 Windeln)

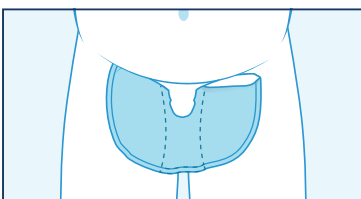

1. Legen Sie die Windel unter den Hodensack, ziehen Sie sie in Richtung Kopf, um einen optimalen Kontakt sicherzustellen, und verstauen Sie sie zwischen den Beinen, um Ausscheidungen aufzufangen.

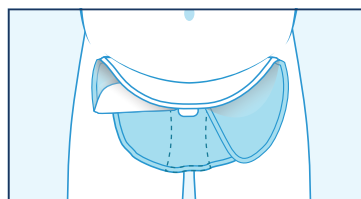

2. Platzieren Sie die zweite Windel und falten Sie sie der Länge nach nach unten zusammen, und stellen Sie dabei sicher, dass die Körpermitte ausreichend abgedeckt ist.

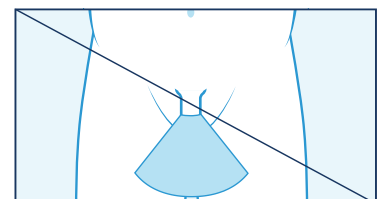

Legen Sie QuickChange nicht so an, dass die Windel Richtung der Beine zeigt.