

# Couche pour homme incontinent QuickChange



**quickCHANGE**  
INCONTINENCE WRAP

## Profil du patient

Patients masculins incontinents et non ambulatoires

## Exemples de cas d'utilisation

- Pénis rétracté/scrotum élargi
- Patients ayant une détérioration de la peau
- Patients avec un cathéter à demeure
- Aération ouverte avec des sous-couches absorbantes



### Prévention des infections

Utilisez en complément d'un cathéter permanent pour aider à réduire le risque d'infection.



### Alternative au cathéter

À utiliser là où les cathéters externes sont compliqués à installer.




### Maintenir l'intégrité de la peau

Garder l'urine éloignée de la peau sans utiliser d'adhésifs



### Minimiser le contact entre le soignant et le patient

Vérification et changement en 60 secondes !

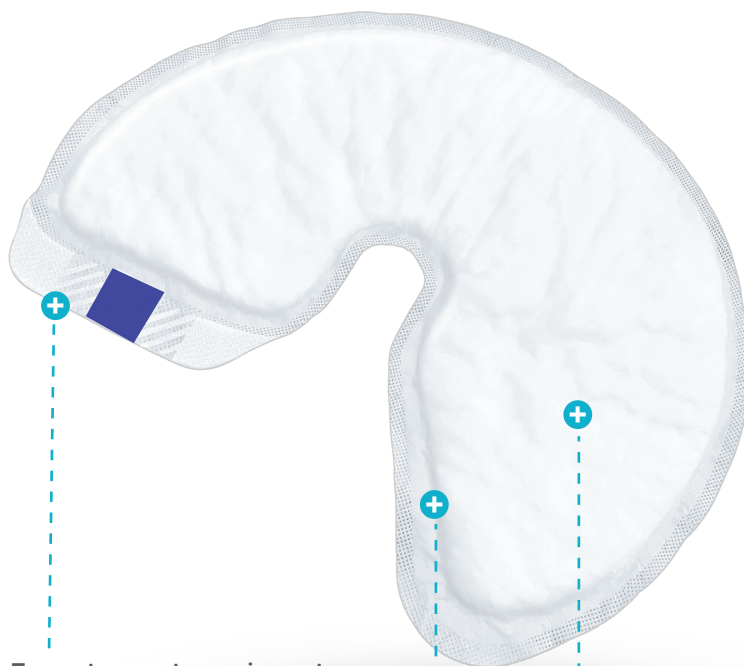

### Fermeture auto-agrippante

Aucun adhésif nécessaire pour une application et un retrait faciles.


### Forme unique

Conçu pour s'adapter à tous les types d'anatomie et ne nécessite pas de mouvement circulaire pour l'appliquer ou le retirer.


### Coeur superabsorbant

Absorbe l'humidité et les sécrétions avant qu'elles ne s'accumulent sur la peau ou le linge.


## Comment utiliser QuickChange

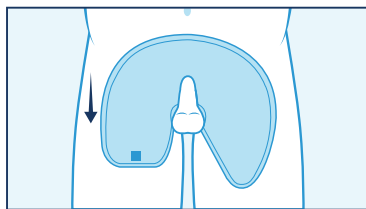

1. Placez le côté blanc vers le haut, le bord arrondi vers la tête et les deux rabats vers les jambes.

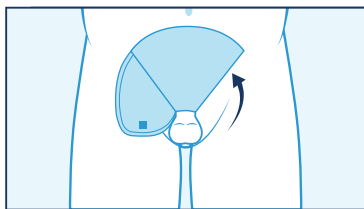

2. Pliez le rabat pointu sur le pénis à 45° puis pliez le rabat droit par-dessus.

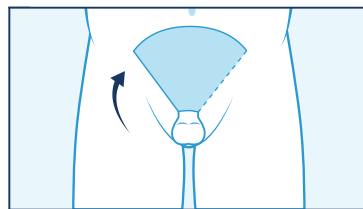

3. Avec deux doigts, pincez le fermoir à crochet avec le rabat intérieur pour attacher.



Scannez le code QR pour des utilisations supplémentaires et des informations.


Pour plus d'informations,  
contactez votre représentant Quickchange.  
[customerservice@quickchange.com](mailto:customerservice@quickchange.com)

Applications supplémentaires et instructions  
au verso de cette page.


# Applications du QuickChange




## Pénis standard (Utilisez 1 couche)

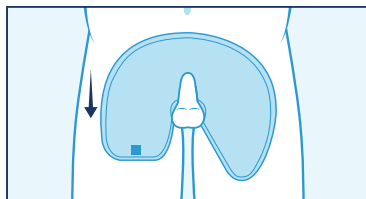

1. Placez le côté blanc vers le haut, le bord arrondi vers la tête et les deux rabats vers le bas, en direction des jambes.

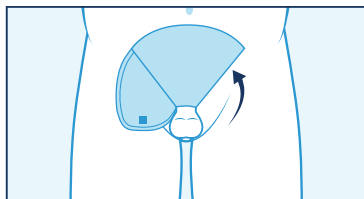


2. Pliez le rabat pointu sur le pénis à 45° puis pliez le rabat droit par-dessus.

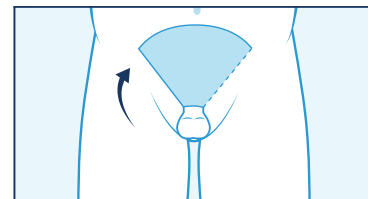


3. Avec deux doigts, pincez le fermoir à crochets avec le rabat intérieur pour attacher.


## Pénis rétracté/Œdème scrotal moyen (Utilisez 1 couche)

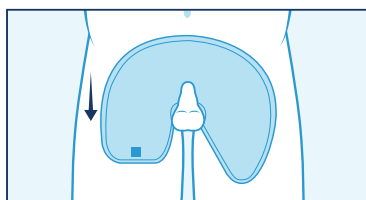

1. Placez le côté blanc vers le haut, le bord arrondi vers la tête et les deux rabats vers le bas, en direction des jambes.

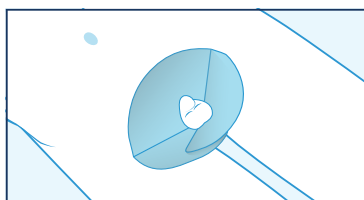


2. Faites glisser le rabat pointu sous le scrotum, soulevez et ramenez vers le haut, puis pliez le rabat droit par-dessus.

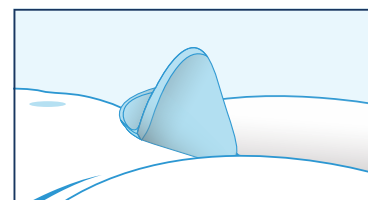


3. Pincez le fermoir à crochets et le rabat intérieur ensemble pour assurer l'attachement.

## Œdème scrotal large (Utilisez 2 couches)

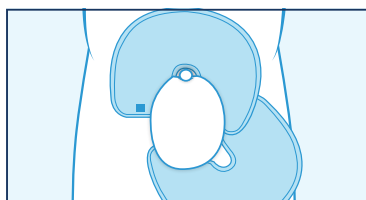


1. Positionnez deux couches autour du scrotum et du pénis ; attachez ensemble la partie de droite avec la partie pointue de l'autre couche.

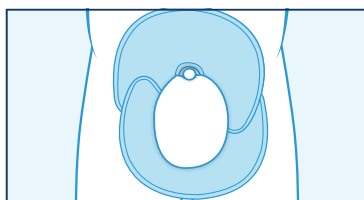


2. Tirez les deux autres rabats l'un vers l'autre, en formant une forme de bol sous le scrotum, puis pincez-les ensemble pour les attacher.

## Bariatrique (Utilisez 2 couches)

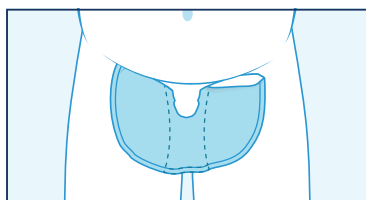


1. Placez sous le scrotum, tirez vers la tête pour assurer le contact, puis glissez entre les jambes pour attraper les écoulements.

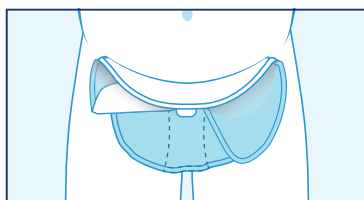


2. Placez la deuxième couche et pliez-la en deux dans le sens de la longueur en direction du bas, assurez vous que le milieu est bien recouvert.

## Utilisation incorrecte

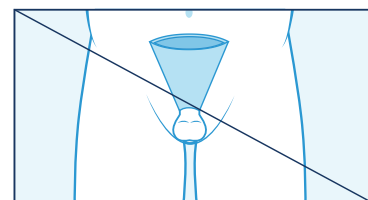

**Ne roulez pas** en une forme de cône/entonnoir serrée.

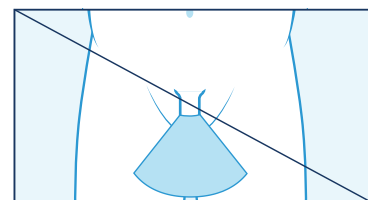

**Ne laissez pas** le QuickChange pointé vers les jambes.