

# QuickChange™ 男 性用失禁ラップ



## 患者プロフィール

歩行能、失禁のある男性患者達

## 使用例

- ・ 陰茎の陥没/陰嚢の肥大
- ・ 皮膚損傷のある患者たち
- ・ 留置カテーテルを使用している患者たち
- ・ アンダーパッドを使用した「オープンエアリング」



### 感染予防

感染のリスクを軽減するために留置カテーテルと併用してください。



### カテーテルの代替

外部カテーテルの使用が困難な場合に使用できます。




### 肌の健康を維持

接着剤を使わずに尿が皮膚に付着するのを防ぎます。



**スタッフと患者の接触を最小限に抑える**  
わずか60秒でチェックと交換が可能!

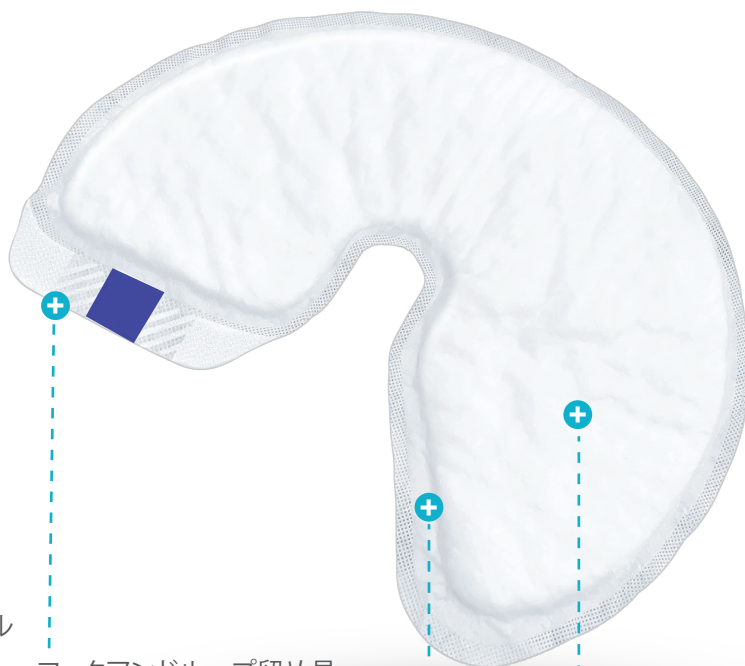


フックアンドループ留め具  
接着剤が不要で、簡単に貼り付け、剥がせます


ユニークな形状  
すべての解剖学タイプにフィットするように設計されており、装着や取り外しの際に体を回転させる必要がありません。

超吸収性コア  
水分を吸い取り、肌やリネンに溜まる前に排出物を吸収します


## クイックチェンジの適用方法

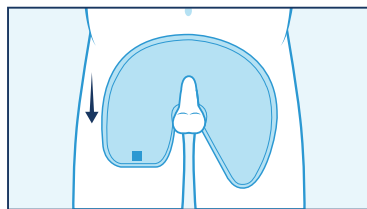

1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

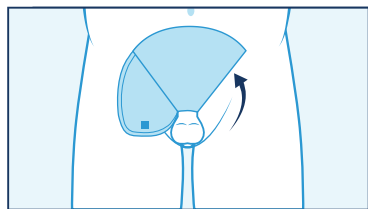

2. 尖ったフラップをペニスに45°の角度で折り曲げ、次にまっすぐなフラップを上折り曲げてください。

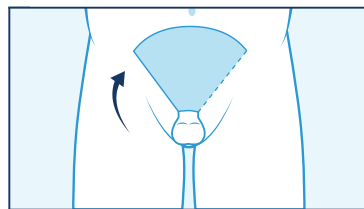

3. 二本の指でフックファスナーと内側のフラップをつまんで確実に固定してください。



追加のアプリケーションと情報については、QRコードをスキャンしてください。


詳細情報については、メドラインの担当者にお問い合わせください。

追加のアプリケーションと手順はこのページの裏面にあります。


# QuickChange™ の使用方法




## 標準的なペニス (1つのラップを使用)

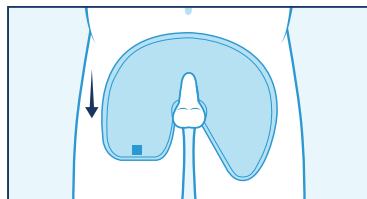

1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に向け、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

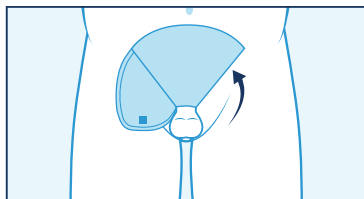


2. 尖ったフラップをペニスに45°の角度で折り曲げ、次にまっすぐなフラップを上を折り曲げてください。

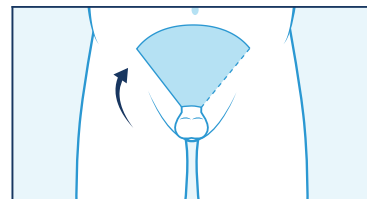


3. 二本の指でフックファスナーと内側のフラップをつまんで確実に固定してください。


## 陥没陰茎/中程度の陰嚢浮腫 (一つのラップ使用)

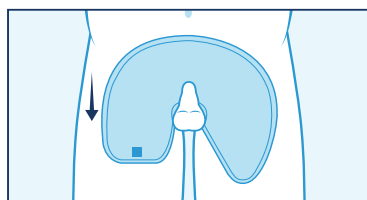

1. 白い面を上にして、丸い端を頭の方に向け、二つのフラップを下にして脚の方に置いてください。

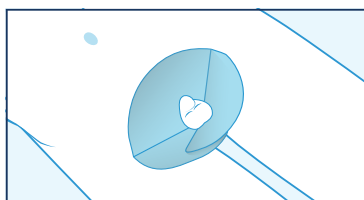


2. 尖ったフラップを陰嚢の下に差し込み、持ち上げて上方にすくい上げ、まっすぐなフラップを折り返してください。

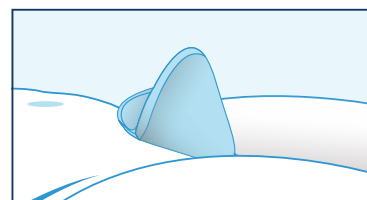


3. フック留め具と内側のフラップを一緒に挟み、しっかりと固定されていることを確認してください。

## 大きな陰嚢浮腫 (2つのラップを使用)

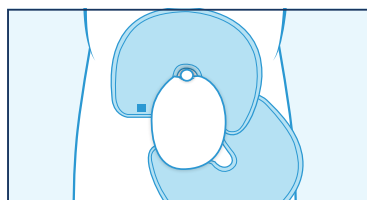


1. 陰嚢とペニスの周りに二つのラップを配置してください。まっすぐなフラップと尖ったフラップを一緒に固定してください。

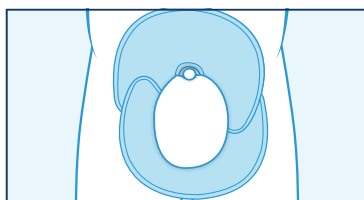


2. 残りの二つのフラップを互いに引き寄せ、陰嚢の下にボウル状を作り、一緒に挟んでしっかりと固定されていることを確認してください。

## ⚠ 誤った使用方法

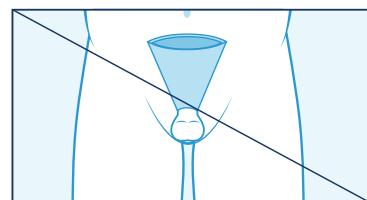


きつい円錐形や漏斗形に巻き込まないでください。


## 肥満患者用 (二つのラップを使用)

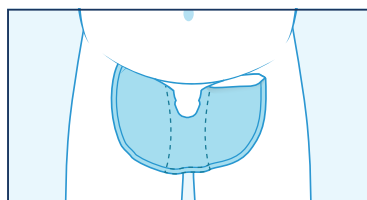

1. 陰嚢の下に配置し、接触を確実にするために頭側に引き寄せ、脚の間に挟んで排泄物をキャッチしてください。

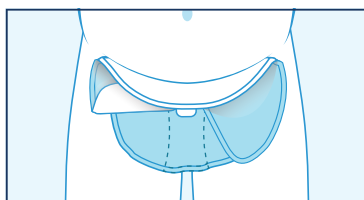

2. 二つ目のラップを置き、下向きと縦向きに半分に折り、中央が十分に覆われていることを確認してください。

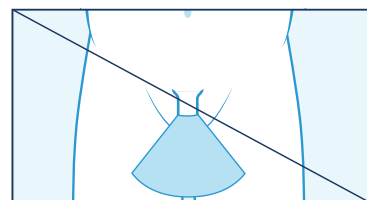

QuickChangeを脚の方向に向けたままにしないでください。