

Protetor Masculino para Incontinência QuickChange™



Perfil do Paciente

Pacientes do sexo masculino não-ambulatoriais e com incontinência

Exemplos de casos de uso

- Pênis retraído/escroto aumentado
- Pacientes com lesões de pele
- Pacientes com cateter permanente
- Ventilação da pele com protetores absorventes de colchão



Prevenção de infecções

Em conjunto com um cateter permanente para ajudar a reduzir o risco de infecção.



Alternativa ao uso de cateteres

Situações onde os cateteres externos são difíceis de utilizar.




Manter a integridade da pele

Manter a urina longe da pele sem usar adesivos.



Minimizar o contato entre a equipe e o paciente

Verificação e troca em 60 segundos!

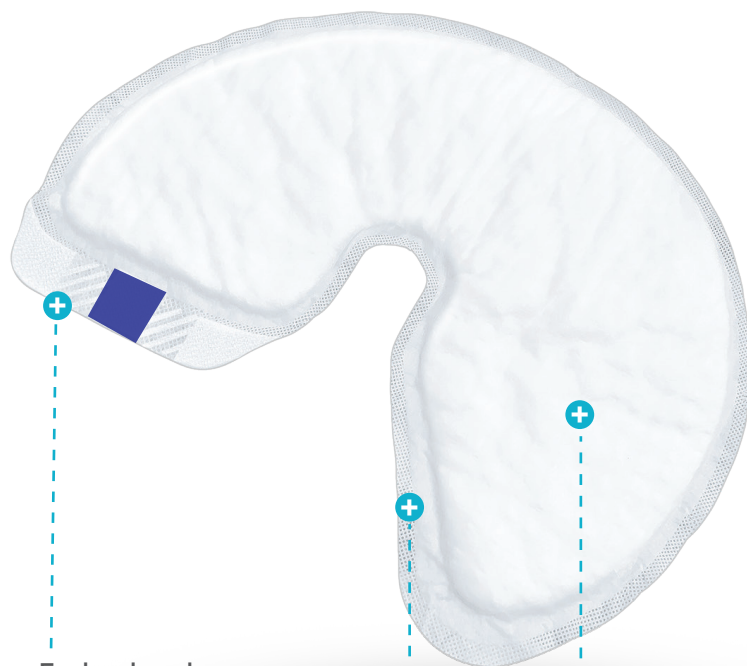

Fecho de velcro

Não é necessário adesivo para uso e remoção fáceis


Formato único

Projetado para se ajustar a todos os tipos de anatomia e não requer movimentação do corpo para uso ou remoção


Núcleo superabsorvente

Absorve a umidade e retém os fluídos antes que se acumulem na pele ou na roupa de cama


Como o QuickChange é usado

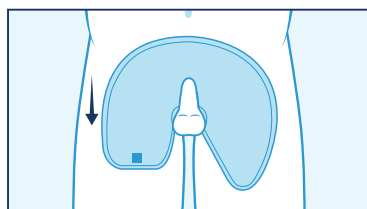

1. Coloque o lado branco para cima, com a borda arredondada voltada para a cabeça e as duas abas voltadas para as pernas.

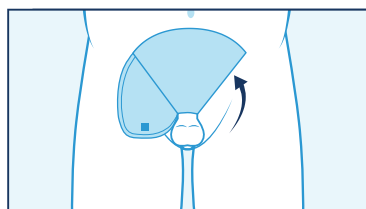

2. Dobre a aba pontiaguda sobre o pênis em um ângulo de 45° e, em seguida, dobre a aba reta por cima.

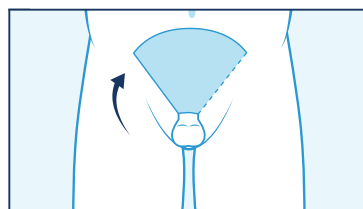

3. Com dois dedos, aperte o fecho adesivo e a aba interna unindo-os para garantir a fixação.



Escaneie o código QR para ver outras informações e formas de uso


Para mais informações, entre em contato com o representante da Quickchange
customerservice@quickchange.com

Outras instruções e formas de uso
no verso desta página.


Formas de uso do QuickChange™




Pênis padrão (Use 1 protetor)

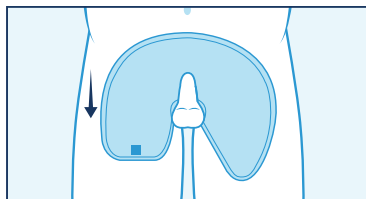

1. Coloque o lado branco para cima, com a borda arredondada voltada para a cabeça e as duas abas voltadas para as pernas.

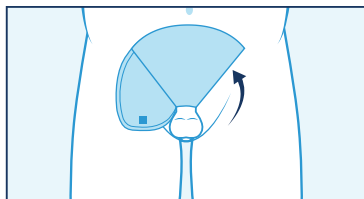


2. Dobre a aba pontiaguda sobre o pênis em um ângulo de 45° e, em seguida, dobre a aba reta por cima.

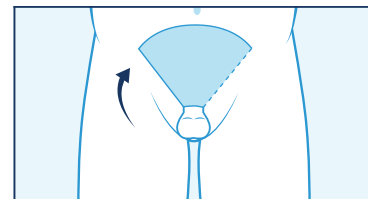


3. Com dois dedos, aperte o fecho adesivo e a aba interna unindo-os para garantir a fixação.


Pênis Retrátil/Edema Escrotal Moderado (Use 1 Protetor)

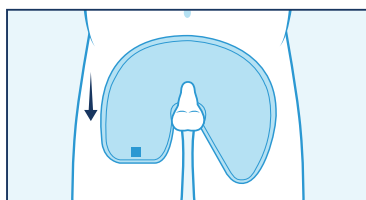

1. Coloque o lado branco para cima, com a borda arredondada voltada para a cabeça e as duas abas voltadas para as pernas.

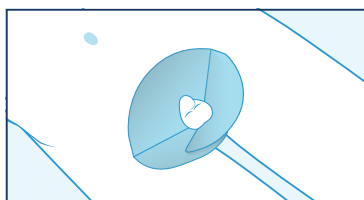


2. Deslize a aba pontiaguda por baixo do escroto, levante-a e puxe para cima, e depois dobre a aba reta por cima.

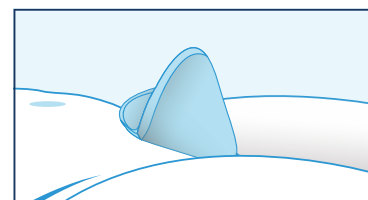


3. Aperte o fecho adesivo e a aba interna unindo-os para garantir a fixação.

Edema Escrotal Grave (Use 2 Protetores)

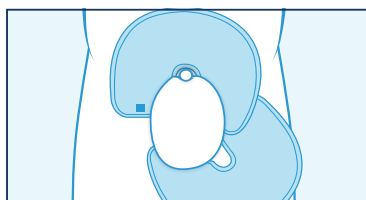


1. Posicione dois protetores ao redor do escroto e do pênis; uma a aba reta e a aba pontiaguda.

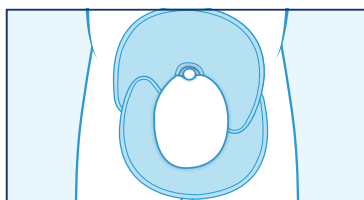


2. Puxe as outras duas abas em direção uma à outra, criando um formato de tigela abaixo do escroto, e aperte-as unidas para garantir a fixação.

Pacientes Bariátricos (Use 2 Protetores)

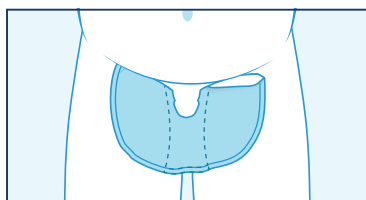


1. Coloque abaixo do escroto, puxe em direção à cabeça para garantir o contato, e insira entre as pernas para reter vazamentos.

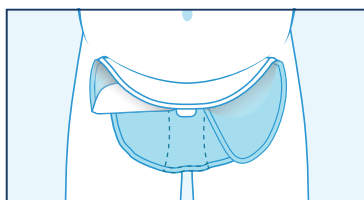


2. Coloque o segundo protetor e dobre ao meio de cima para baixo e no sentido do comprimento, certificando-se de que o centro esteja coberto adequadamente.

⚠️ Uso Incorreto

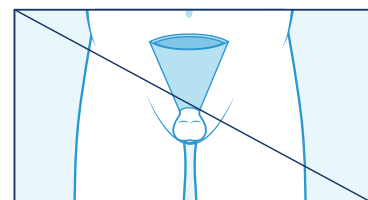

Não enrole em forma de cone ou funil apertado.

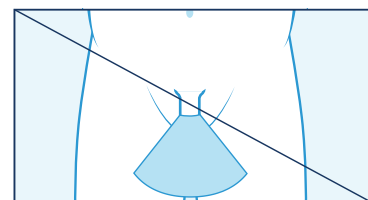

Não deixe o QuickChange apontado em direção às pernas.