

Envoltura para incontinencia masculina QuickChange™



Perfil del paciente

Pacientes masculinos no ambulatorios e incontinentes

Ejemplos de casos de uso

- Pene retraído/escroto agrandado
- Pacientes con lesiones en la piel
- Pacientes con un catéter permanente
- “Ventilación abierta” con protectores absorbentes



Prevención de infecciones

Usar en combinación con un catéter permanente para ayudar a reducir el riesgo de infección.



Alternativa al catéter

Usar donde los catéteres externos son problemáticos.




Mantener la integridad de la piel

Mantener la orina alejada de la piel sin usar adhesivos.



Minimizar el contacto personal/paciente

¡Control y cambio en 60 segundos!

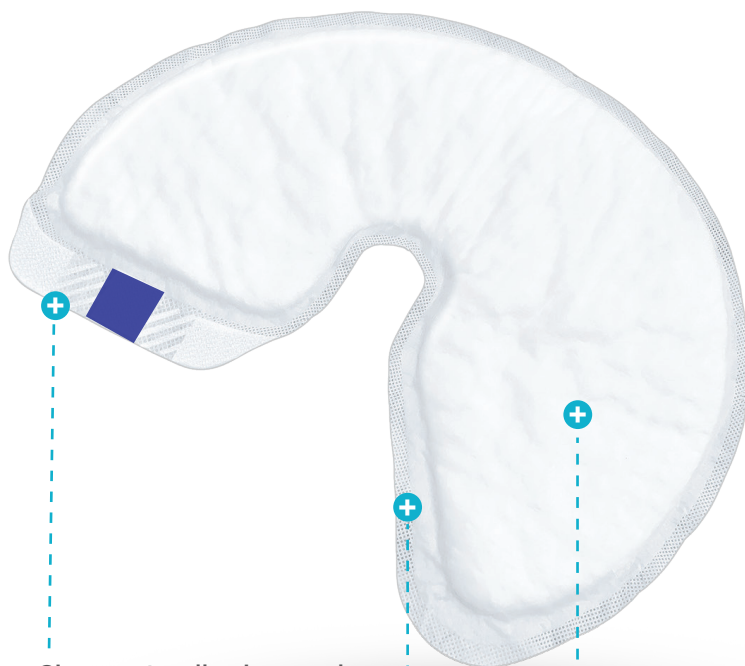

Cierre autoadhesivo o velcro

No se requiere adhesivo para una fácil aplicación y remoción


Forma única

Diseñado para adaptarse a todos los tipos de anatomía y no requiere girar el cuerpo para aplicar o retirar


Centro superabsorbente

Atrae la humedad y absorbe las secreciones antes de que se acumulen sobre la piel o en la ropa de cama


Cómo se aplica QuickChange

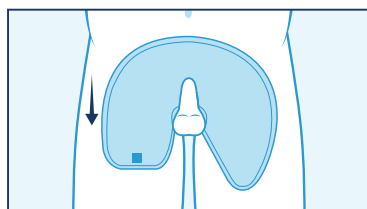

1. Coloque el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo en dirección a las piernas.

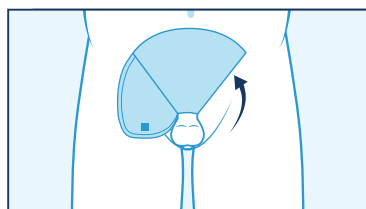

2. Doble la solapa puntiaguda sobre el pene en un ángulo de 45° y luego doble la solapa recta por encima.

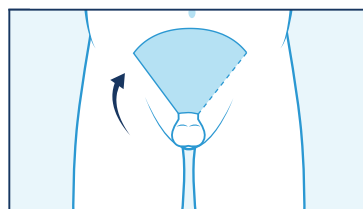

3. Con dos dedos, presione el cierre autoadhesivo junto con la solapa interior para asegurar la sujeción.



Escanee el código QR para obtener información y aplicaciones adicionales.


Para más información, póngase en contacto con su representante de Quickchange.
customerservice@quickchange.com

Aplicaciones adicionales e instrucciones en el reverso de esta página.


Aplicaciones de QuickChange™




Pene estándar (Uso 1 de la envoltura)

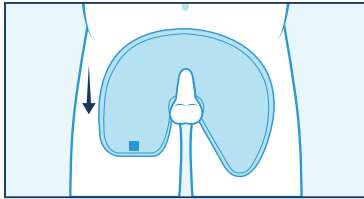

1. Coloque el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo en dirección a las piernas.

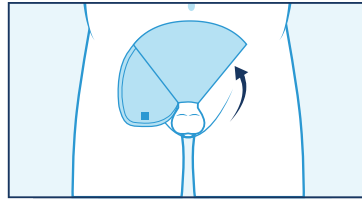


2. Doble la solapa puntiaguda sobre el pene en un ángulo de 45° y luego doble la solapa recta por encima.

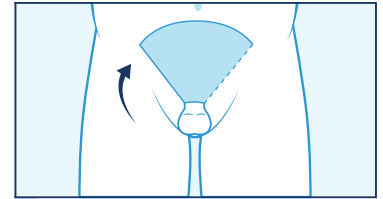


3. Con dos dedos, presione el cierre autoadhesivo junto con la solapa interior para asegurar la sujeción.


Pene retraído/Edema escrotal moderado (Uso 1 de la envoltura)

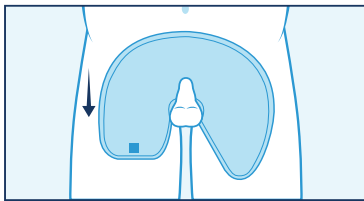

1. Coloque el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo en dirección a las piernas.

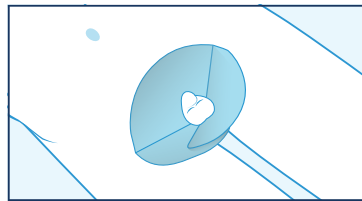


2. Deslice la solapa puntiaguda por debajo del escroto, levántela y empújela hacia arriba y, a continuación, doble la solapa recta sobre ella.

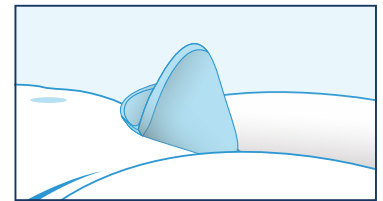


3. Presione el cierre de velcro y la solapa interior para asegurar la fijación.

Edema escrotal grande (Uso 2 de la envoltura)

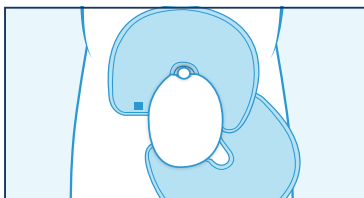


1. Coloque dos envolturas alrededor del escroto y el pene; sujete juntas una solapa recta y otra puntiaguda.

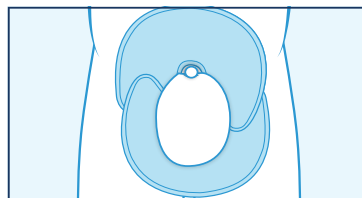


2. Tire de las otras dos solapas una hacia la otra, creando una forma de cuenco debajo del escroto y presione para asegurar la unión.

⚠ Uso incorrecto

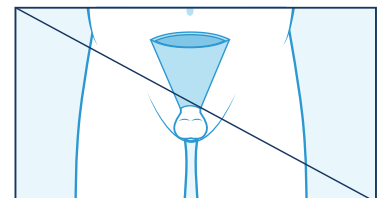


No enrolle en forma de cono/embudo ajustado


Bariátrico (Usar 2 envolturas)

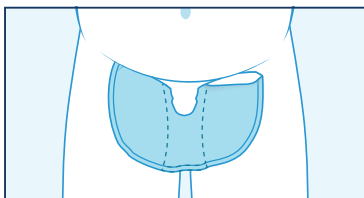

1. Coloque debajo del escroto, tire hacia la cabeza para asegurar el contacto, y coloque entre las piernas para recoger las secreciones.

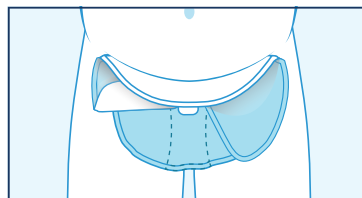

2. Coloque la segunda envoltura y dóblela por la mitad hacia abajo y a lo largo, asegurando que el centro esté adecuadamente cubierto.

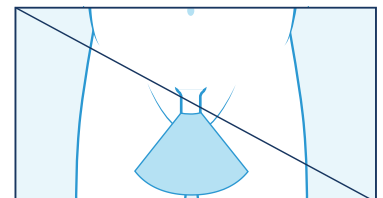

No deje el QuickChange apuntando hacia las piernas.